

# 取扱説明書

エルダーサポートワイドマットレス

**PSB-FS(4/4)**  
**PSB-FSL(4/4)**


この度は、エルダーサポートワイドマットレスPSB-FS(4/4)・PSB-FSL(4/4)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- この製品は、改良などの理由により取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

**警告** この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用手すりと併用して使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
  - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないで下さい。
  - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。

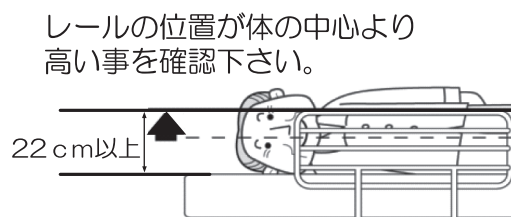

**注意** この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないで下さい。
  - ・中身やカバーが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転倒事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないで下さい。
  - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離して下さい。
  - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないで下さい。
  - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

## 特徴

- 普通のウレタンと低反発ウレタンによる、やや柔らかめのマットレスです。
- 軽量タイプで取り扱いも簡単です。

## 使用方法

- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使い下さい。
- マットレスの上には、ベッドパッドやシーツを敷いてお使い下さい。

## お手入れ

●カビの発生や悪臭の発生を抑えるには

- 1.定期的に窓を開け室内の通気・換気を行って下さい。
- 2.天気の良い日は定期的に日陰に干して下さい。
- 3.外カバーは取り外しできません。

●ダニが発生した場合は、マット全面に掃除機をかけて下さい。また、直射日光に30分程度あてた後、全面をもう一度掃除機で吸う事で、更に効果があります。

注：直射日光に当てると変色する可能性があります。

## 仕様

商品名	エルダーサポートワイドマットレス
型 式	PSB-FS(4/4)・PSB-FSL(4/4)
寸 法 長さ×幅×厚さ	長さ1960×幅970×厚さ130mm：PSB-FS(4/4) 長さ2060×幅970×厚さ130mm：PSB-FSL(4/4)
重さ	7.8kg：PSB-FS(4/4) 8.8kg：PSB-FSL(4/4)
材料	低反発ウレタン、ウレタン
外装生地組成	ポリエステル
原産国	マレーシア

製品についてのお問合せは下記フリーコールまでご連絡下さい。



# 0120-77-3433

携帯・PHS・OK

《平日 午前9時～午後5時》(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

### プラッツネットワーク

■本 社	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑2丁目8-28	TEL:092-584-3434
■関東支店	〒105-0014	東京都港区芝2丁目16-9	TEL:03-5427-8033
■東海支店	〒485-0082	愛知県小牧市村中足中代927	TEL:0568-42-0588
■関西支店	〒541-0046	大阪府大阪市中央区平野町4-6-4-2F	TEL:06-6233-2105
■九州支店	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑2丁目8-28 (本社内)	TEL:092-584-3433

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目8-28

'09.12月 作成

TS091203