









この度は、Miolet キャスターセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 取り付け前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用いただきますよう、よろしくお願いたします。
 なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。
 不足部品が無いが、梱包内容をお確かめください。

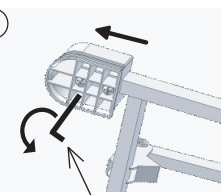
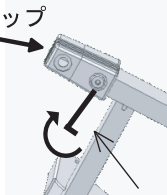
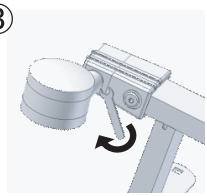
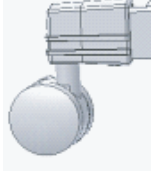
● 梱包内容

 キャスター ストッパー付き：2個	 キャスター ストッパー無し：2個	 キャップ：4個	 ネジ：4本
 スパナ：1本	 六角レンチ：1本	 保証書：1枚	 本書：1枚

● 昇降ユニットへのキャップとキャスターの取り付け方

※必ず、昇降ユニットのみの状態で取り付けをおこなってください。

ストッパー付きキャスターとストッパー無しキャスターは、昇降ユニットにそれぞれ対角側にて取り付けてください。

 ①	六角レンチでネジを 2本外した後、カバーを スライドさせて外して ください。	 ②	キャップ キャップを横からはめて、 内側の穴を付属のネジを 使用し、六角レンチで締 めてください。
 ③	付属のスパナで外側の 穴に、キャスターを 取り付けてください。	 ④	同様に、4箇所 に取り付けをおこなっ てください。

⚠ 警告

キャップとキャスターを取り付けの際は、ベッドを組み立てた状態でおこなわないでください。また、昇降ユニットを立てて取り付ける場合は昇降ユニットが倒れないように注意してください。

ストッパー付きのキャスターが対角線になるように取り付けてください。

キャスターの取り付け完了後、昇降ユニットを正常な状態に戻しキャスターをロックしてください。

ベッドを移動するとき以外は、ストッパーを踏み込んでロックしてください。

キャップ、キャスター、ネジの取り付けが確実かどうか、定期的に必ず点検してください。

○点検 / お手入れ

・キャップ、キャスター、ネジの取り付けが確実かどうか、定期的に必ず点検をしてください。

・乾いた柔らかい布で拭いてください。
 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。

・製品に水を散らしたり、ベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤など、ご使用しないでください。

○商品に関してのお問い合わせは
 下記フリーコールまでご連絡ください。



0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時》

株式会社 **フラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目8-28

09.3月作成