

取扱説明書


オーバーテーブル

PGT-400LM


この度は、Miolet オーバーテーブルをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願い致します。
介護が必要な方がお使いになる場合は、介護する方もこの取扱説明書を必ずお読みください。
この製品は、改良などの理由により取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。予めご了承ください。
この説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

●梱包内容


オーバーテーブル：1台、保証書：1枚、取扱説明書（本紙）：1枚

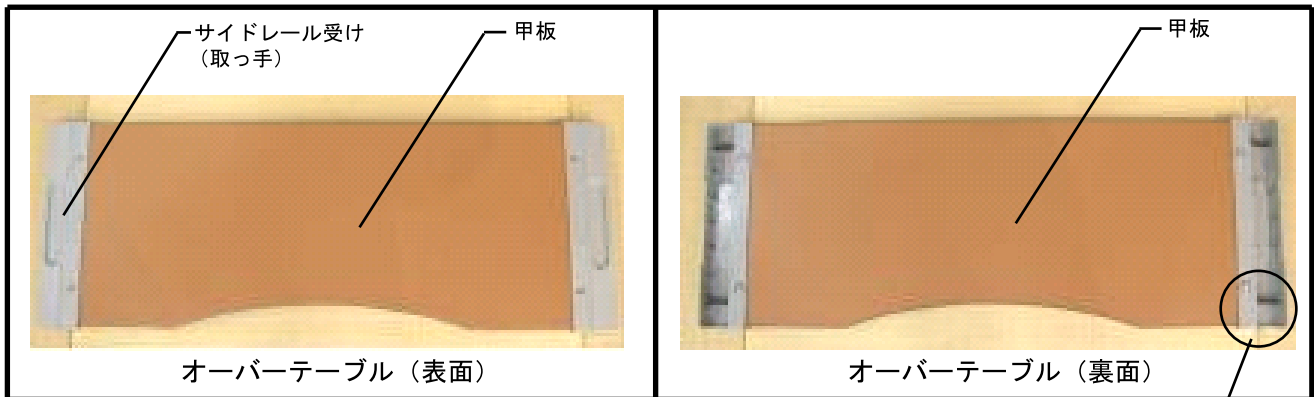

●ベッドへの取付け方

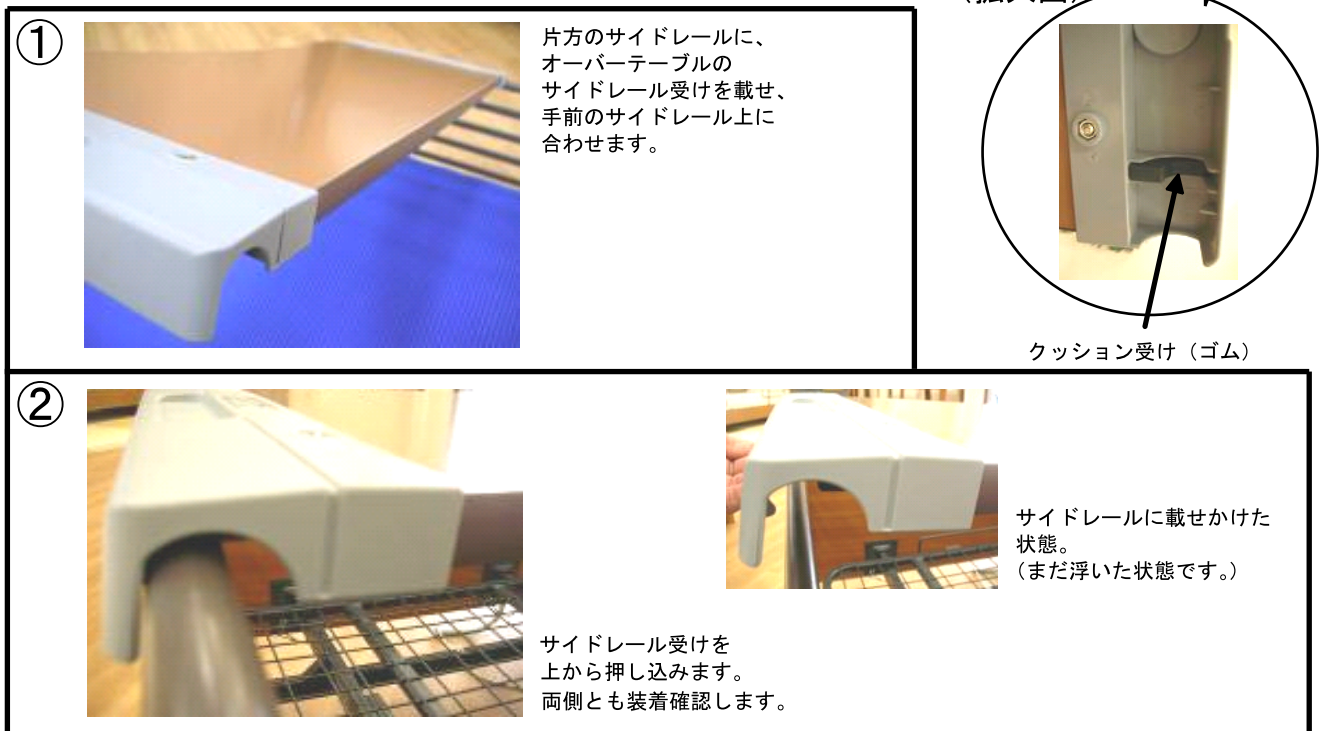

●ベッドへの装着例

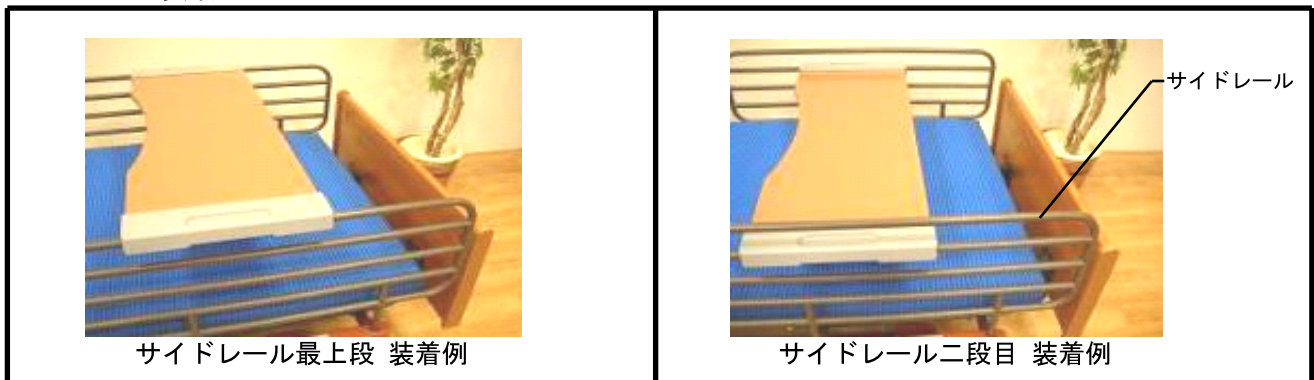

■オーバーテーブルのサイドレール受けが、確実にサイドレールにはまっていることを確認してください。

 警告

○オーバーテーブルが、サイドレールにしっかりとハマっていることを確認してください。

○オーバーテーブルは、ガタツキのない安定した位置で使用してください。

○オーバーテーブルがガタツク場合は、サイドレールの位置も調整してください。

○サイドレールが、ベッドにしっかりと差し込まれているか確認してください。

○本製品をテーブル以外の目的に使用しないでください。
・思わぬケガや破損の原因になります。

○テーブルの上に乗らないでください。
・大きな事故につながります。特にお子様にはご注意ください。

○テレビなど重い物は載せないでください。
・最大使用荷重：15 Kg

○ベッドの背上げ、脚上げ操作を行う時は、必ずテーブルをベッドから外してください。
・ベッドとテーブルの間等にはさまれて、ケガをする原因となります。

○テーブルに手を付いたり、体を寄りかからないでください。
・テーブルが急にズレたり、転倒したり、落下してケガをする原因となります。

○鍋、釜、ポットなど倒れると危険ですので、載せないでください。
・やけど等の原因となります。

●オーバーテーブルとベッド、サイドレールとの組合せについて

・ベッド、サイドレール、オーバーテーブルの各々が同じメーカーであることを確認してください。(別のメーカー同士の組合せでご使用にならないでください。)

●お手入れについて

- ・本体のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- ・製品に水を散らしたり、ベンジン、シンナー、オイル類、粉末洗剤などご使用しないでください。

仕 様

品 名	オーバーテーブル
品 番	PGT-400LM
外形寸法	幅 1003× 奥行 358× 厚さ 41 mm
重 量	約 3.2kg
材 質	ボード：プリント紙化粧繊維板/PVC 取っ手：ABS樹脂/TPR60A
最大使用荷重 (耐荷重)	15 kg

台湾製

●商品に関するお問合せは、
下記フリーコールまでご連絡ください。



株式会社 **ブラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目8-28

‘08.3月作成