

# 取扱説明書

スタンダードマットレス


PKM-E80

この度は、スタンダードマットレスPKM-E80をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

**警告** この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用すりばちと併用して使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
  - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないで下さい。
  - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。

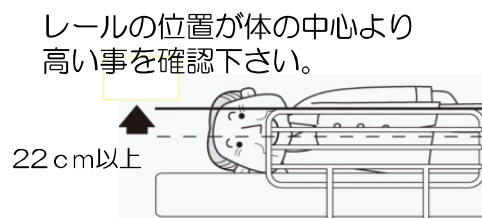

**注意** この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないで下さい。
  - ・中身やカバーが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転倒事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないで下さい。
  - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離して下さい。
  - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないで下さい。
  - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

## 特徴

- 通気性、通水性に優れたポリエステルマットレスです。
- 外カバーは抗菌・防臭・難燃処理をしています。
- 外カバーは取り外しができ洗濯が可能です。

## 使用方法

- マットレスの上には、ベッドパッドやシーツを敷いてお使い下さい。
- 定期的に頭足方向を変えることで、硬化を抑え長持ちさせることができます。

## お手入れ

- カビの発生や悪臭の発生を抑えるには  
1.定期的に窓を開け室内の通気・換気を行って下さい。  
2.天気の良い日は定期的に日陰に干して下さい。  
3.外カバーは家庭用洗濯機で洗濯可能です。

### ●外カバーの洗濯時の注意（マットタグの説明）



液温は40℃までで、洗濯機の弱水流による洗濯ができます。



2分以下の短時間で絞って下さい。



塩素漂白剤での漂白はできません。



アイロンは使わないで下さい。



ドライクリーニングには対応していません。

- 中身は2層構造になっていますので、汚れた場合、それぞれをご家庭のシャワーなどで洗浄して下さい。水切れの良いポリエステルを採用していますが、日陰で干し乾いた後にカバーに入れて下さい。

- ダニが発生した場合は、外カバーを洗濯し、マット中身に掃除機をかけて下さい。また、直射日光に30分程度あてた後、全面をもう一度掃除機で吸う事で、更に効果があります。

注：直射日光に当てると変色する可能性があります。

## 仕様


商品名	スタンダードマットレス
型 式	PKM-E80
寸 法 長さ×幅×厚さ	長さ1910×幅900×厚さ80mm
重さ	6.2kg
材料	外カバー・芯地：ポリエステル
原産国	韓国

品質表示

品名: スタンダードマットレス  
型式: PKM-E80

お手入れ

外カバー ポリエステル100%



株式会社プラッツ  
福岡県大野城市仲畑2-8-28  
TEL: 092-584-3434

7cm

3.5cm

型式 PKM-E80  
品質表示

材料	ポリエステル	ロットNo.
寸法	長さ1911×幅900×厚さ80mm	
外カバー組成	ポリエステル100%	
原産国	韓国	

使用上の注意

- ・ストーブや暖房など火気・温度の高いものに近づけないで下さい。商品の劣化や火災の恐れがあります。
- ・無理に折り曲げないで下さい。
- ・湿気を避け、風通しがよく、直射日光の当たらない所に置いて下さい。
- ・マットレスの上で飛んだり、跳ねたりしないで下さい。

7cm

3.5cm



ロットNo.

**090815**

↑ year    ↑ month    ↑ day

ゴム印で6桁の数字を押印