

取扱説明書

硬質ウレタンマットレス


PSB-FW14(4/4)

この度は、硬質ウレタンマットレスPSB-FW14(4/4)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- この製品は、改良などの理由により取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

警告 この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用手すりと併用して使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないで下さい。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。

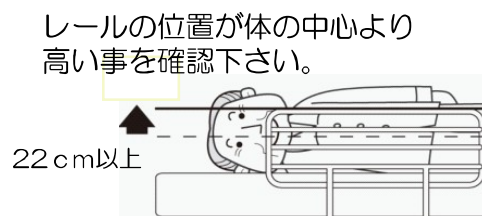

注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないで下さい。
 - ・中身やカバーが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転倒事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないで下さい。
 - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離して下さい。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないで下さい。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

特徴

- 普通のチップウレタンと硬質のチップウレタンの良さを生かしたやや固めのマットレスです。
- 外カバーは洗濯が可能です。カバーは上下別々に洗濯して下さい。


使用方法


- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使い下さい。
- マットレスの上には、ベッドパッドやシーツを敷いてお使い下さい。
- 定期的に頭足方向を変えることで、硬化を抑え長持ちさせることができます。


お手入れ

- カビの発生や悪臭の発生を抑えるには
 - 1.定期的に窓を開け室内の通気・換気を行ってください。
 - 2.天気の良い日は定期的に日陰に干してください。
 - 3.外カバーは手洗いで洗濯可能です。*カバーは上下別々に洗濯してください。


●洗濯時の注意（マットタグの説明）

 手洗い
30 30° 以下のお湯で
手洗いができます。

 エンジン
サラン
塩素漂白剤での
漂白はできません

 ドライ
ドライクリーニングは
できません

 絞っては
いけません

 日陰でのつり干しが
適しています

- ダニが発生した場合は、外カバーを洗濯し、マット中身に掃除機をかけて下さい。
また、直射日光に30分程度あてた後、全面をもう一度掃除機で吸う事で、更に効果が
あります。
注：直射日光に当てると変色する可能性があります。

仕様

商品名	硬質ウレタンマットレス
型 式	PSB-FW14(4/4)
寸 法 長さ×幅×厚さ	長さ1960×幅960×厚さ140mm
重さ	15.3kg
材料	ウレタンフォーム・チップウレタン・フェルト(ポリエステル)
外装生地組成	ポリエステル100%
原産国	ベトナム